


# Hygiene

## im Städtischen Krankenhaus Nettetal

### Bettenaufbereitung

- o **Jeder Patient erhält bei Aufnahme ein umfassend gereinigtes und desinfiziertes Bett mit frischer Bettwäsche inkl. „Innenleben“.**
  - Die Desinfektion und Reinigung erfolgt ursächlich in unserer Bettenzentrale durch unterwiesene Mitarbeiter unseres Hauses
  - Alle Betten sind mit Matratzen mit abwaschbaren Vollbezügen ausgestattet.
  - Benutzte Kopfkissen und Bettdecken (Innenleben) werden grundsätzlich nach jeder Benutzung desinfizierend aufbereitet.

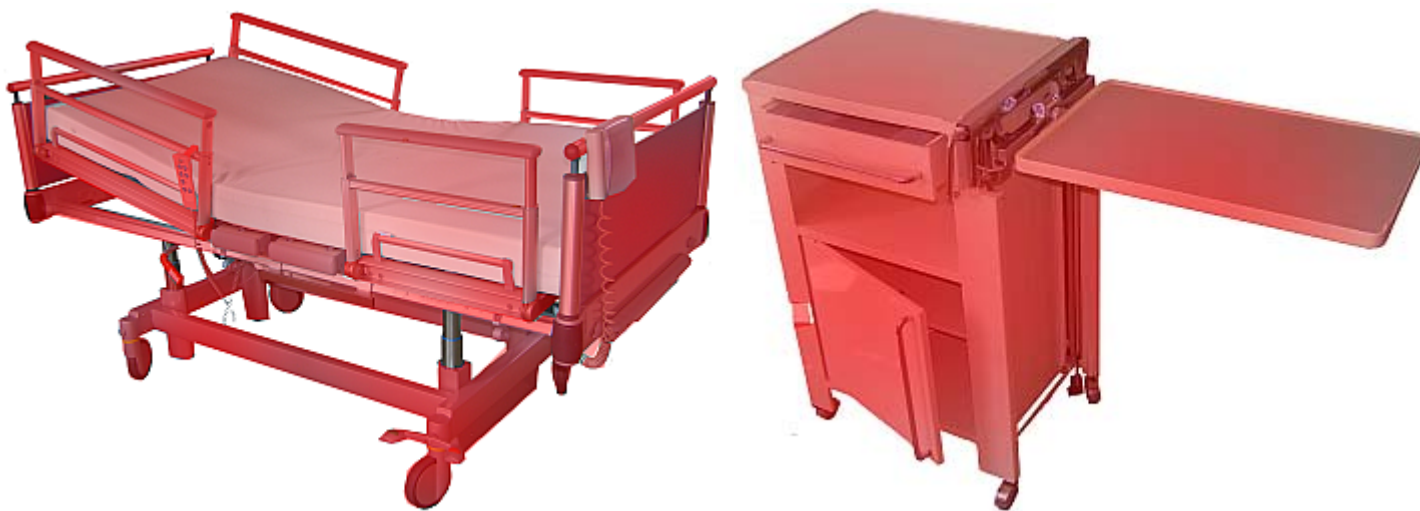

Aufbereitung bei Entlassung oder Verlegung - rot = erforderliche desinfizierende Reinigung



Hygieneplan Bettenzentrale		
Was	Wie	Womit
<b>Reinigung/Desinfektion:</b>		
Grundlage:	⇒ Durch die desinfizierenden Maßnahmen werden Krankheitskeime abgetötet!	
Kopfkissen Bettbezüge	⇒ Optisch einwandfrei saubere Kopfkissen und Bettdecken können im Dampfdesinfektionsapparat desinfiziert werden! ⇒ Bei sichtbarer Verschmutzung Kopfkissen/Bettdecken zur Wäscherei geben! Ein Absprühen der Bettdecken, Kopfkissen etc. ist nicht erlaubt!	Dampfdesinfektionsapparat Wäscherei
Bettgestell/ Matratzen Zubehör:	⇒ Die Matratzen (auch evtl. Lagerungsmatratzen) vom Bett räumen und auf dem entsprechenden Gestell in der Bettenschleuse ablegen! ⇒ Das Bettgestell, evtl. Bettgallen, Zubehör etc. mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch/leder feucht abwischen! ⇒ Schwer entfernbare Verschmutzungen mit einem Desinfektionsmittel getränkten Schwamm entfernen! ⇒ Die Matratzen desinfizierend abwischen und auf das desinfizierte Bettgestell legen! Desinfizierte Matratzen nicht auf dem Boden abstellen! ⇒ Das desinfizierte Bett durch die Abtrennung schieben!	Incidin-extra n 0,25%
Airwave-/Biwave- Matratzen:	⇒ Die Matratze mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen. ⇒ Das Gehäuse des Motors ebenfalls mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tuch abwischen!	Reine Seite BZ  Incidin-extra-n 0,25%

